

# MANUAL MULETILLA BU



## Índice

- [1.- Importante](#)
- [2.- Simbología de la etiqueta y del manual](#)
- [3.- Indicaciones del producto](#)
- [4.- Descripción del producto](#)
- [5.- Precauciones y seguridad](#)
- [6.- Montaje y uso](#)
- [7.- Características técnicas](#)
- [8.- Cuidado y mantenimiento](#)
- [9.- Reciclaje del producto](#)
- [10.- Almacenamiento del producto](#)

[11.- Vida útil](#)

[12.- Garantía y servicio post-venta](#)

[13.- Ensayos y pruebas realizadas](#)

[14.- Datos del fabricante](#)

## **1.- Importante**

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con el vendedor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico u ortopeda antes de usar este producto. Ellos le aconsejarán e informarán sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

## 2.- Simbología de la etiqueta y del manual

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Datos del fabricante                        |
|    | Fecha de fabricación                        |
|    | Dispositivo Médico (Medical Device)         |
|    | Observe las instrucciones de seguridad      |
|    | Peso máximo de usuario en kg                |
|    | Conformidad CE                              |
|  | Precaución, peligro de atrapamiento         |
|  | Invitación a consultar el manual de usuario |
|  | Información de reciclaje del producto       |
|  | Punto limpio                                |
| <b>SN</b>                                                                           | Número de serie del producto                |
| <b>LOT</b>                                                                          | Número de lote del producto                 |
| <b>REF</b>                                                                          | Referencia o código del producto            |

## 3.- Indicaciones del producto

Los bastones o muletas y muletilas son ayudas para permitir el apoyo para el usuario con el propósito de asistir al caminar cuando se requiere un soporte adicional para desplazarse.

#### 4.- Descripción del producto



1. Puño
2. Caña fija
3. Clip de regulación de caña
4. Centrador de caucho
5. Caña telescópica
6. Contera


## 5.- Precauciones y seguridad



Si no se siguen estas precauciones de seguridad se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No exceda el límite de peso máximo de 100 kg.
- Asegúrese de que todas las piezas estén bien sujetas y en buen estado de funcionamiento antes de utilizar el producto.
- Asegúrese de que las partes móviles están fijadas por los clip de regulación y que la altura de los puños sea la adecuada para su uso.
- Use el producto de forma correcta, no exceda ni intente movimientos arriesgados y no lo utilice en superficies resbaladizas y/o con terreno irregular. Se recomienda su uso sólo en superficies planas y sólidas.
- Reemplace la contera si está desgastada o dañada.
- Utilice solo los accesorios y piezas originales de la marca Forta.
- No utilice el producto para caminar hacia atrás, en el sentido contrario de la marcha.
- No haga ningún ajuste ni regulación en el producto mientras esté en uso.
- No utilice el producto en una pendiente húmeda, helada o nevada.
- Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor para reemplazarla.

## 6.- Montaje y uso

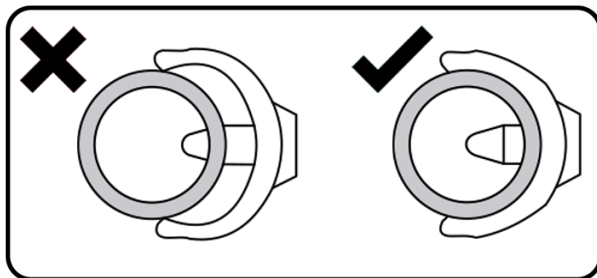

- Para regular la altura, primero retire el clip de regulación, luego deslice el tubo interior hasta la altura deseada, haciendo coincidir los agujeros de los tubos para, a continuación, colocar el clip de regulación fijando la altura.
- Antes de utilizar el producto asegúrese de que los clips de regulación estén fijados y correctamente posicionados tal como se muestra en la imagen superior.
- La muleta debe situarse en el brazo opuesto al de la pierna lesionada.
- Asegúrese de que la muleta esté regulada en altura de tal modo que sus hombros no queden encogidos, la altura correcta es en la cual usted pueda estar completamente erguido.

## 7.- Características técnicas

A continuación se detallan las medidas, resistencias y pesos relevantes:

| ALTURA      | PESO    | RESISTENCIA |
|-------------|---------|-------------|
| 740 a 920mm | 0,385kg | 100kg       |

## 8.- Cuidado y mantenimiento



Si no se cuida y mantiene el producto en perfecto estado puede existir riesgo de accidente.

- Limpie el producto regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice abrasivos, detergentes o disolventes.
- Séquelo con un paño limpio, suave y seco.
- No utilice agentes de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- En el caso de detectar una avería, no repare el producto usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.

## 9.- Reciclaje del producto



Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que desecharlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte las directrices de eliminación a su empresa local de gestión de residuos o punto limpio más cercano.

## 10.- Almacenamiento del producto



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe riesgo de accidente.

- No guarde este producto durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Mantenga el producto alejado de toda llama y chispa.
- Siga las siguientes condiciones a la hora de guardar o almacenar el producto:
  - Almacene el producto en un lugar seco y templado.
  - Proteja el producto del polvo y la corrosión embalándolo o embolsándolo.
  - Almacene todas las piezas o componentes retirados juntos en un mismo lugar para evitar que se mezclen con otros productos o se pierdan.
  - Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga sobre ellos (no coloque objetos pesados sobre el producto o sus elementos).

## 11.- Vida útil

La vida útil prevista de este producto es de 1 año en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. En todo caso, el producto

puede requerir el reemplazo de ciertas piezas o componentes por su desgaste normal en un periodo inferior al indicado.

## **12.- Garantía y servicio post-venta**

Condiciones de la garantía:

Solo los productos originales Forta, comprados en establecimientos autorizados, estarán cubiertos por la garantía contra los defectos de piezas y mano de obra.

El periodo de garantía será válido desde la fecha de compra y será de 3 años para estructura y componentes siempre que se respeten las siguientes condiciones:

- Solo los productos originales FORTA comprados en establecimientos autorizados estarán cubiertos por la garantía contra defectos de piezas y mano de obra.
- En caso de cualquier anomalía en el producto, el establecimiento comprador deberá notificarlo inmediatamente.
- El fabricante no se responsabilizará de los defectos causados como consecuencia de una incorrecta manipulación, negligencia o por no respetar las instrucciones descritas en este manual.
- Durante el periodo de garantía, cualquier pieza que resulte defectuosa por un fallo en el montaje o en los materiales será reparada o repuesta sin cargo por Forta.
- Quedará absolutamente anulada la garantía si se realizaran incorrectas modificaciones o regulaciones en el producto o acoplaran piezas u opciones no correspondientes al modelo de producto.
- No se cubrirán daños de óxido por un mal uso o negligente, por el ataque de líquidos o vapores que puedan dañar el producto.

**LA GARANTÍA NO INCLUYE LAS CONSECUENCIAS RESULTANTES DE UN PROBLEMA LOGÍSTICO, EN CONCRETO QUE CONCIERNAN AL TRANSPORTE, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, GASTOS, ETC.**

**Forta NO será responsable en los siguientes casos:**

- Desgaste natural del producto o uso inapropiado o incorrecto.
- Defectos de montaje o arreglos llevados a cabo por el comprador o una tercera persona.
- Trato o mantenimiento negligente o uso de piezas no adaptadas.
- Reparaciones o modificaciones realizadas en talleres no oficiales.
- Forta no se responsabiliza de los daños causados al usuario o a terceros por modificaciones o alteraciones en los productos.
- La garantía tampoco cubre las modificaciones realizadas con piezas no originales Forta.

El certificado de garantía deberá remitirse a FORTA, S.L. junto con la fotocopia de la factura correspondiente en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de compra. Para la aplicación de esta garantía, el usuario deberá presentar el certificado con el sello del establecimiento suministrador. Puede descargar el certificado de garantía aquí: [www.fortasl.es/es/manuales/doc/GARANTIA CONTRACTUAL.pdf](http://www.fortasl.es/es/manuales/doc/GARANTIA CONTRACTUAL.pdf).

### 13.- Ensayos y pruebas realizadas

Nuestros bastones, muletas y muletilas FORTA son de acuerdo con el anexo IV de la MDR (EU) 2017/745, cuentan con marcado CE y han sido diseñados y ensayados acordes a la normativa UNE-EN ISO 11334-1:2007. Forta está obligada a acreditar que sus productos cumplen con una serie de requisitos esenciales. Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos se ha elaborado una normativa que especifica el modo de inspección y ensayo de los productos. A continuación se especifican las diferentes normativas con las que cumple el producto:

| Descripción breve de la normativa                      | Normativa vigente                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Información proporcionada por el fabricante            | UNE-EN ISO 20417:2021                            |
| Sistema de gestión de calidad                          | UNE-EN ISO 13485:2018                            |
| Gestión de riesgos                                     | UNE-EN ISO 14971:2020                            |
| Ensayos de productos sanitarios y bastones o muletilas | UNE-EN ISO 21856:2023<br>UNE-EN ISO 11334-1:2007 |
| Evaluación biológica de productos sanitarios           | UNE-EN ISO 10993-1:2021                          |
| Resistencia máxima                                     | 100 kg                                           |

### 14.- Datos del fabricante

#### FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

España - Spain

Apartado de Correos 5316

[info@fortasl.es](mailto:info@fortasl.es)

[www.fortasl.es](http://www.fortasl.es)



MADE IN EUROPE

