

# MANUAL ANDADOR DRAKON 2



## Índice

- [1.- Importante](#)
- [2.- Simbología de la etiqueta y del manual](#)
- [3.- Indicaciones del producto](#)
- [4.- Descripción del producto](#)
- [5.- Precauciones y seguridad](#)
- [6.- Montaje y uso](#)
- [7.- Características técnicas](#)
- [8.- Cuidado y mantenimiento](#)
- [9.- Reciclaje del producto](#)
- [10.- Almacenamiento del producto](#)

[11.- Vida útil](#)

[12.- Garantía y servicio post-venta](#)

[13.- Ensayos y pruebas realizadas](#)

[14.- Datos del fabricante](#)











## **1.- Importante**

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con el vendedor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico u ortopeda antes de usar este producto. Ellos le aconsejarán e informarán sobre la técnica de caminar más apropiada para usted.

## 2.- Simbología de la etiqueta y del manual

	Datos del fabricante
	Fecha de fabricación
	Dispositivo Médico (Medical Device)
	Observe las instrucciones de seguridad
	Peso máximo de usuario en kg
	Conformidad CE
	Precaución, peligro de atrapamiento
	Invitación a consultar el manual de usuario
	Información de reciclaje del producto
	Punto limpio
<b>SN</b>	Número de serie del producto
<b>LOT</b>	Número de lote del producto
<b>REF</b>	Referencia o código del producto

## 3.- Indicaciones del producto

Los andadores son ayudas para permitir el apoyo a personas con dificultades para caminar y que las asisten para sostenerse y mantener el equilibrio mientras caminan

## 4.- Descripción del producto



1. Puño de goma
2. Tubo del puño regulable
3. Clip de regulación de altura
4. Asiento
5. Respaldo
6. Ruedas delanteras
7. Ruedas traseras
8. Pletina
9. Manetas de freno
10. Cesta

## 5.- Precauciones y seguridad




Si no se siguen estas precauciones de seguridad se corre el riesgo de sufrir lesiones graves.

- No exceda el límite de peso máximo de 130 kg.
- En caso de que el andador lleve cesta, no exceda el límite máximo de carga de la misma (3 kg). Las cargas sólo pueden ser transportadas en la cesta. No coloque objetos pesados sobre el andador ya que esto puede afectar a su estabilidad.
- Asegúrese de que todas las piezas estén bien sujetas y en buen estado de funcionamiento antes de utilizar el andador.

- Asegúrese de que el andador esté completamente abierto y el asiento fijado antes de utilizarlo.
- Asegúrese antes de empezar la marcha de que la maneta de freno está suelta y no está frenando las ruedas.
- Pruebe la maneta de freno antes de usar el andador. Cuando las ruedas están bloqueadas, la zapata del freno de la rueda trasera debe impedir que las ruedas giren.
- Comprobar que cuando se liberan las manetas de los frenos, las ruedas pueden girar libremente.
- Bloquee siempre la maneta de freno antes de sentarse.
- Asegúrese de que los dos tubos de los puños están fijados por el clip de regulación y ambos a la misma altura. Compruebe la estabilidad del andador antes de aplicar el peso total a los puños.
- No utilice el asiento cuando el andador esté en un terreno inclinado o desigual. Use el andador sólo en superficies planas y sólidas.
- Reemplace las ruedas si están muy desgastadas o dañadas.
- No mueva el andador mientras esté usted u otra persona sentada. Este producto es una ayuda para caminar y no debe ser utilizado como un dispositivo de transporte.
- No utilice el andador en escaleras o escaleras mecánicas.
- Utilice solo los accesorios y piezas originales de la marca Forta.
- No utilice el andador para caminar hacia atrás, en el sentido contrario de la marcha.
- No haga ningún ajuste ni regulación en el andador mientras esté en uso.
- Todas las ruedas deben estar siempre en contacto con el suelo.
- No utilice el andador para subir aceras o bordillos.
- No utilice el andador en una pendiente húmeda, helada o nevada.
- Si alguna pieza está dañada, rota o desgastada, póngase en contacto con su distribuidor para reemplazarla.

## 6.- Montaje y uso

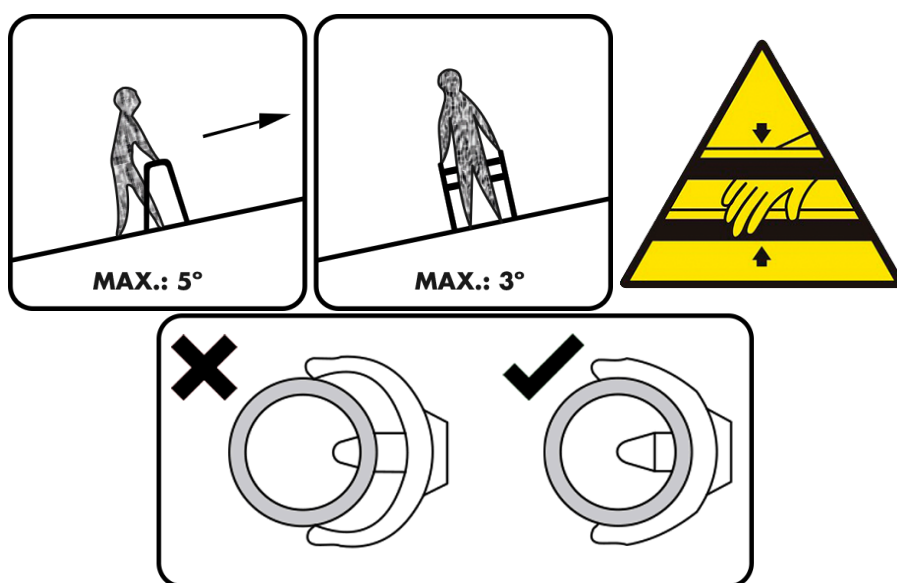

Para regular la altura del andador, siga las siguientes instrucciones:


1. En una de las empuñaduras, retire el clip de regulación tirando hacia afuera.

2. Deslice la empuñadura hacia arriba o abajo hasta colocarla en la altura deseada.
3. Cuadre los agujeros donde estaba colocado el clip de regulación para que coincidan.
4. Coloque el clip de regulación para fijar la altura.
5. Repita estas acciones para regular la otra empuñadura

Antes de utilizar el andador asegúrese de que ambos clips de regulación están fijados y correctamente posicionados tal como se muestra en la imagen de arriba.


Para desplegar el andador, siga las siguientes instrucciones:

1. Apoyar en parte trasera y empujar los puños hasta hacer tope.
2. Bajar el asiento y encajar en el tubo de apoyo.
3. Para ajustar la altura de los puños, retire el clip de regulación, ajuste la altura y vuelva a colocarlo para fijarla.

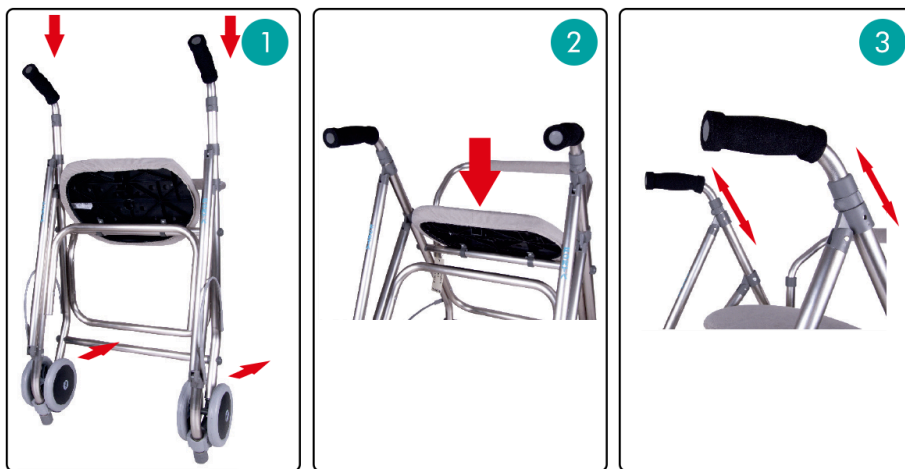

Para plegar el andador, siga las siguientes instrucciones:

1. Sacar el asiento del tubo de apoyo tirando hacia arriba.
2. Apoyar en parte trasera y tirar de los puños hasta plegar.

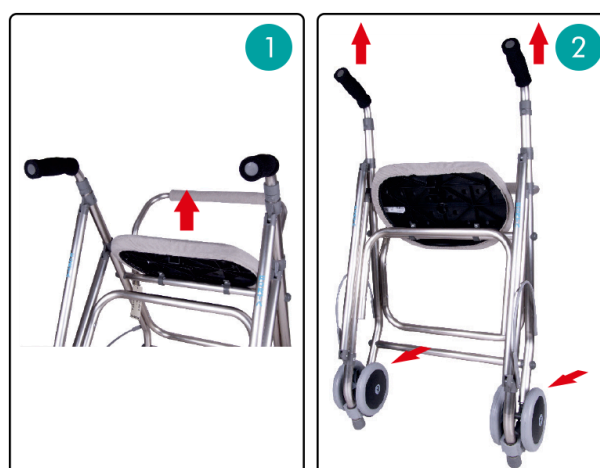


Para montar el respaldo de tela en el andador, siga los siguientes pasos:

1. Coloque el anclaje al lado de una de las piezas correspondiente del andador. La pieza se encuentra directamente debajo del clip de regulación de los puños y cuenta con un agujero en cada uno de sus lados.
2. Mientras sujeta el andador agarrándolo del puño con una mano, con la otra presione el anclaje por uno de los lados y busque encajar el tetón (el saliente) con el agujero de la




pieza del andador. Puede mover el anclaje hasta que note que ese lado ha encajado y el tetón haya entrado en el agujero.

3. Una vez encajado uno de los lados del anclaje, presione sobre su lado contrario para encajarlo. Asegúrese de que ambos tetones quedan dentro del agujero y que el anclaje rodea perfectamente al andador.
4. Asegúrese de que el anclaje está fijado tirando fuertemente de él hacia afuera. Si el anclaje no se suelta, proceda con los pasos anteriores con el anclaje del lado contrario.
5. Una vez fijados ambos anclajes, tire del respaldo sujetando el andador para comprobar que no se suelta, asegurándose de que esté bien anclado.

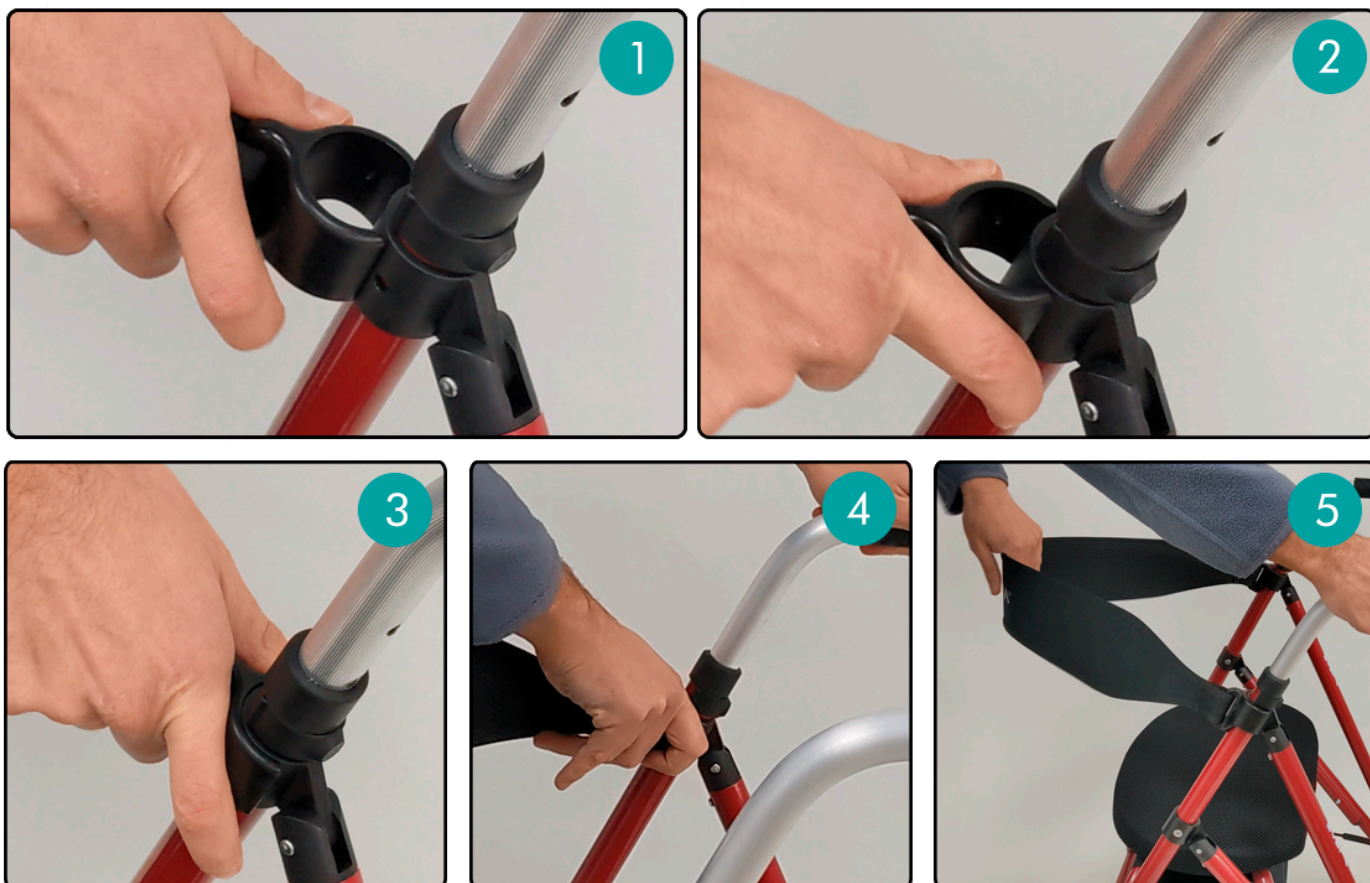


Si los anclajes no se fijan correctamente el respaldo podrá soltarse y el usuario podrá caerse al apoyarse. Debe asegurarse de que los dos tetones de cada anclaje están bien introducidos dentro del andador. Antes de sentarse en el andador y utilizar el respaldo debe asegurarse de que ambos anclajes están bien fijados. Tire fuertemente de cada uno de ellos y de la tela del respaldo hacia afuera para asegurarte.

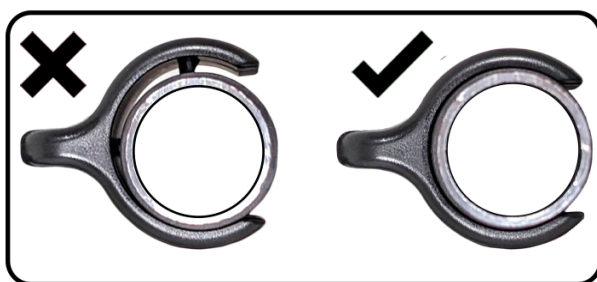

En caso de necesitar desmontar el respaldo, es aconsejable utilizar un destornillador plano. Introduzca la punta del destornillador por uno de los lados del anclaje y gírelo para soltar ese lado. Una vez suelto un lado, simplemente tire del anclaje para sacarlo completamente.

Los frenos cuentan con dos posiciones:

- 1. Desbloqueados: Para activar los frenos accione la maneta de freno hacia el puño.
- 2. Bloqueados: Bloquee los frenos empujando la maneta de freno hacia abajo. Los frenos permanecerán activados frenando el andador hasta que se desbloqueen accionando la maneta hacia el puño.

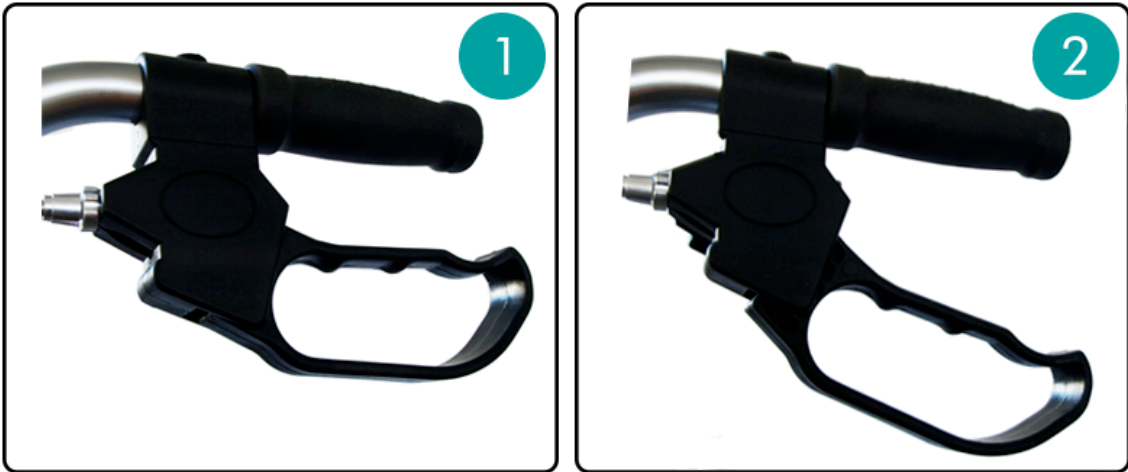

7.- Características técnicas

A continuación se detallan las medidas, resistencias y pesos relevantes del andador:

ALTURA	LONGITUD	ANCHURA	LONGITUD PLEGADO
850 a 960mm	645mm	570mm	300mm
MEDIDAS ASIENTO	ALTURA HASTA EL ASIENTO		DIÁMETRO RUEDAS
400x260mm	550mm		150mm
ANCHURA INTERIOR	PESO		RESISTENCIA MÁXIMA
425mm	5,220kg		130kg

8.- Cuidado y mantenimiento



Si no se cuida y mantiene el producto en perfecto estado puede existir riesgo de accidente.

- Limpie el producto regularmente con agua tibia y un paño suave. No utilice abrasivos, detergentes o disolventes.
- Séquelo con un paño limpio, suave y seco.
- Asegúrese de que no haya acumulación de suciedad o pelos alrededor del eje o las ruedas.
- No utilice agentes de limpieza que contengan fenol o cloro, ya que esto podría dañar los materiales de aluminio y poliamida.
- Lubrique las ruedas con un poco de aceite si chirrían, así como el resto de partes móviles de andador.
- En el caso de detectar una avería, no repare el producto usted mismo. Consulte a un distribuidor autorizado.
- Conviene revisar periódicamente el estado de fijación de los tornillos ya que con el uso diario pueden aflojarse.
- Todos los andadores contienen o pueden contener elementos plásticos que, al inflamarse, pueden producir gases tóxicos. No exponer el producto o ninguno de sus



componentes a fuentes de calor intensas que puedan producir su inflamación.

## 9.- Reciclaje del producto



Cuando el producto se haya vuelto inutilizable y tenga que desecharlo: póngase en contacto con su distribuidor especializado. Si desea llevar a cabo el reciclaje por sí mismo, pregunte las directrices de eliminación a su empresa local de gestión de residuos o punto limpio más cercano.

## 10.- Almacenamiento del producto



Si no se respetan las condiciones de almacenamiento, el producto puede resultar dañado y, por tanto, existe riesgo de accidente.

- No guarde este producto durante un período prolongado de tiempo cerca de una fuente de calor o al sol (por ejemplo, detrás de una ventana o cerca de un radiador) o cerca de una fuente de frío.
- Mantenga el producto alejado de toda llama y chispa.
- Siga las siguientes condiciones a la hora de guardar o almacenar el producto:
  - Almacene el producto en un lugar seco y templado.
  - Proteja el producto del polvo y la corrosión embalándolo o embolsándolo.
  - Almacene todas las piezas o componentes retirados juntos en un mismo lugar para evitar que se mezclen con otros productos o se pierdan.
  - Todos los componentes deben ser almacenados sin ninguna carga sobre ellos (no coloque objetos pesados sobre el producto o sus elementos).

## 11.- Vida útil

La vida útil prevista de este producto es de 1 año en condiciones normales de uso, seguridad y mantenimiento. Más allá de este período, el producto puede ser utilizado siempre y cuando esté en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. En todo caso, el producto puede requerir el reemplazo de ciertas piezas o componentes por su desgaste normal en un periodo inferior al indicado.

## 12.- Garantía y servicio post-venta

Condiciones de la garantía:

Solo los productos originales Forta, comprados en establecimientos autorizados, estarán cubiertos por la garantía contra los defectos de piezas y mano de obra.

El periodo de garantía será válido desde la fecha de compra y será de 3 años para estructura y componentes siempre que se respeten las siguientes condiciones:

- Solo los productos originales FORTA comprados en establecimientos autorizados estarán cubiertos por la garantía contra defectos de piezas y mano de obra.

- En caso de cualquier anomalía en el producto, el establecimiento comprador deberá notificarlo inmediatamente.
- El fabricante no se responsabilizará de los defectos causados como consecuencia de una incorrecta manipulación, negligencia o por no respetar las instrucciones descritas en este manual.
- Durante el periodo de garantía, cualquier pieza que resulte defectuosa por un fallo en el montaje o en los materiales será reparada o repuesta sin cargo por Forta.
- Quedará absolutamente anulada la garantía si se realizaran incorrectas modificaciones o regulaciones en el producto o acoplaran piezas u opciones no correspondientes al modelo de producto.
- No se cubrirán daños de óxido por un mal uso o negligente, por el ataque de líquidos o vapores que puedan dañar el producto.

**LA GARANTÍA NO INCLUYE LAS CONSECUENCIAS RESULTANTES DE UN PROBLEMA LOGÍSTICO, EN CONCRETO QUE CONCIERNAN AL TRANSPORTE, PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, GASTOS, ETC.**

**Forta NO será responsable en los siguientes casos:**

- Desgaste natural del producto o uso inapropiado o incorrecto.
- Defectos de montaje o arreglos llevados a cabo por el comprador o una tercera persona.
- Trato o mantenimiento negligente o uso de piezas no adaptadas.
- Reparaciones o modificaciones realizadas en talleres no oficiales.
- Forta no se responsabiliza de los daños causados al usuario o a terceros por modificaciones o alteraciones en los productos.
- La garantía tampoco cubre las modificaciones realizadas con piezas no originales Forta.

El certificado de garantía deberá remitirse a FORTA, S.L. junto con la fotocopia de la factura correspondiente en el plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de compra. Para la aplicación de esta garantía, el usuario deberá presentar el certificado con el sello del establecimiento suministrador. Puede descargar el certificado de garantía aquí: [www.fortasl.es/es/manuales/doc/GARANTIA\\_CONTRACTUAL.pdf](http://www.fortasl.es/es/manuales/doc/GARANTIA_CONTRACTUAL.pdf).

### **13.- Ensayos y pruebas realizadas**

Nuestros andadores FORTA son de acuerdo con el anexo IV de la MDR (EU) 2017/745, cuentan con marcado CE y han sido diseñados y ensayados acordes a la normativa UNE-EN ISO 11199-2:2021. Forta está obligada a acreditar que sus productos cumplen con una serie de requisitos esenciales. Para acreditar el cumplimiento de estos requisitos se ha elaborado una normativa que especifica el modo de inspección y ensayo de los productos. A continuación se especifican las diferentes normativas con las que cumple el producto:

<b>Descripción breve de la normativa</b>	<b>Normativa vigente</b>
Información proporcionada por el fabricante	UNE-EN ISO 20417:2021
Sistema de gestión de calidad	UNE-EN ISO 13485:2018
Gestión de riesgos	UNE-EN ISO 14971:2020

Ensayos de productos sanitarios y andadores	UNE-EN ISO 21856:2023 UNE-EN ISO 11199-2:2021
Evaluación biológica de productos sanitarios	UNE-EN ISO 10993-1:2021
Resistencia máxima	130 kg

## 14.- Datos del fabricante

### **FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.**

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

España - Spain

Apartado de Correos 5316

[info@fortasl.es](mailto:info@fortasl.es)

[www.fortasl.es](http://www.fortasl.es)



MADE IN EUROPE

